

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO RV ALFA DE AUDÍFONOS INTRA/CIC.

Recuerde: Una correcta limpieza de las prótesis auditivas asegura que éstos funcionen de forma **correcta** y **estable**, **evita averías** y permite disfrutar de las cualidades óptimas de los audífonos durante toda su vida útil.

LIMPIEZA DIARIA.

- Eliminar con una toallita los restos de cerumen de la carcasa.




← **CARCASA**

- Cepillar el filtro que protege el auricular para eliminar todos los restos de cerumen que pudieran obstaculizar la salida del sonido.



- Si su audífono tiene conducto de ventilación ("Venting") pasar el "limpia-venting" que se le proporciona con el kit de limpieza por el conducto para evitar que se tapone y no realice su función.

FILTRO

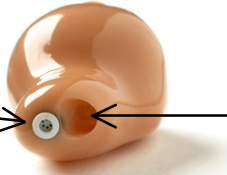

← **VENTING**

LIMPIA-VENTING



Por último, debe guardar el audífono, con el **portapilas totalmente abierto**, dentro de la caja con la pastilla deshumidificadora durante toda la noche. (Recuerde, **¡las letras rojas hacia arriba!**)



MANTENIMIENTO MENSUAL.

- Una vez al mes deberá sustituir la pastilla antihumedad por una nueva. Excepcionalmente, si viaja a destinos con más humedad en el ambiente, la pastilla puede perder su color antes de este tiempo y deberá ser sustituida con antelación.



- Una vez al mes deberá reemplazar el filtro protector del auricular por uno nuevo. Si sus oídos producen mucho cerumen puede que sea necesario reemplazarlos con más asiduidad.



OTROS CUIDADOS.

- Debe de tener especial cuidado en no taponar con suciedad la entrada del micrófono de sus audífonos intras. Debe evitar manipular los audífonos con las manos sucias, teniendo especial cuidado de no tocar la entrada del micrófono. Si observa que dicha ranura está sucia o taponada, puede cepillarla ligeramente para eliminar los restos de suciedad.

**ORIFICIO DE ENTRADA DE SONIDO
(MICRÓFONO)**



OPCIONAL: Puede asegurar sus Audífonos nuevos contra Daños, Rotura Accidental y Robo en el **PRIMER MES** de la compra de los mismos. El coste y las condiciones del seguro dependen del tipo de Audífono.

(Solicite más información en RV ALFA).